




Sekusept® aktiv

ΑΡΙΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Νέα βελτιωμένη
σύνθεση

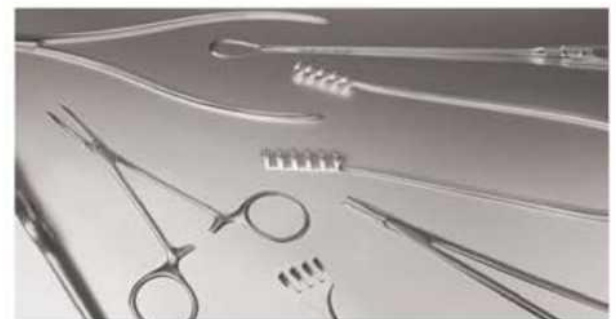


Sekusept® aktiv

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

Ο άριστος καθαρισμός των μολυσμένων εργαλείων είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική απολύμανσή τους. Οι διάφοροι μολυσματικοί παράγοντες που προσκολλώνται στα εργαλεία όπως αίμα, πρωτεΐνες, σωματικά υγρά, συχνά είναι δύσκολο να απομακρυνθούν μέσω του καθαρισμού ή στερεοποιούνται με τη χρήση προϊόντων που περιέχουν αλδεΐδες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας απολύμανσης.

Δεδομένου ότι τα μολυσμένα εργαλεία συνιστούν ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για μετάδοση λοιμώξεων, η άμεση απολύμανσή αμέσως μετά τη χρήση τους αποτελεί την ιδανική μέθοδο για την προστασία του προσωπικού και των ασθενών. Η άριστη καθαριστική δράση του Sekusept Aktiv σε συνδυασμό με την ιδιότητα του να μην στερεοποιεί τις πρωτεΐνες, σας παρέχουν ένα ιδανικό προϊόν με υψηλή καθαριστική και απολυμαντική αποτελεσματικότητα. Το Sekusept Aktiv εξασφαλίζει άριστα αποτελέσματα ακόμη και σε εφαρμογές με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις απορρυπαντικής δράσης όπως η επεξεργασία ενδοσκοπίων ή εργαλείων λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

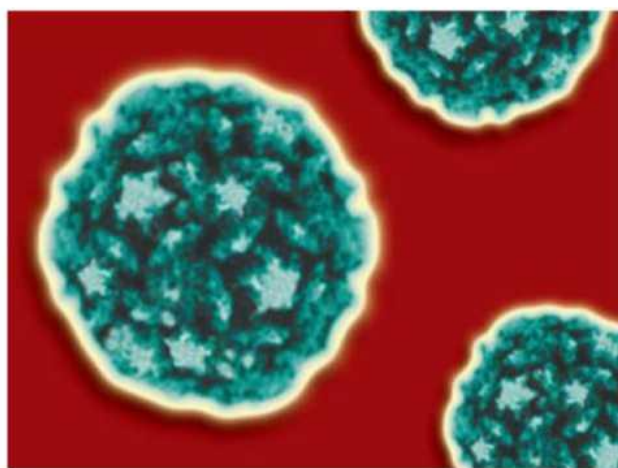

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:

Παράλληλα με τη μεγαλύτερη δυνατή μείωση των μολυσματικών υπολειμμάτων μέσω του καθαρισμού, το αντιμικροβιακό φάσμα ενός απολυμαντικού έχει επίσης πολύ μεγάλη σημασία. Πέρα από τη βακτηριοκτόνο, μυκοβακτηριοκτόνο, σποροκτόνο και μυκητοκτόνο δράση, η ιοκτόνος

	ΤΙ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ	ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΣΑΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	Καταχωρημένο και πιστοποιημένο από το VAH, δοκιμασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του DGHM*	Τυποποιημένη εξασφάλιση για το χρήστη
	Καταχωρημένο από το RKI (Robert Koch Inst.) για αντιμικροβιακό φάσμα τύπου A, αποτελεσματικό κατά βακτηριδίων συμπ. και μυκοβακτηριδίων και μυκήτων. Αποτελεσματικό κατά σπόρων βακτηριδίων. Ιοκτόνο σύμφωνα με το EN14476	Αξιολογημένες δοκιμές πιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του προϊόντος
	Η υψηλή αποτελεσματικότητα της σύνθεσης εξασφαλίζει σύντομο χρόνο δράσης	Μείωση του χρόνου επεξεργασίας και αύξηση της διαθεσιμότητας των εργαλείων
	Χαμηλή συγκέντρωση εφαρμογής	Ισχυρό προϊόν εξαιρετικά οικονομικό στη χρήση
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	Άριστη καθαριστική δράση	Χάρη στην ενεργή καθαριστική του δράση είναι ιδανικό ακόμη και για προβληματικές εφαρμογές με προσκολλημένους μολυσματικούς ρύπους. Επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου χάρη στη σημαντική μείωση της διάρκειας του βουρτσίσματος των εργαλείων. Εμφανώς καθαρότερα εργαλεία με εξαιρετική εμφάνιση.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Ευρεία συμβατότητα με υλικά	Κατάλληλο για κάθε είδους εργαλείο, ειδικά για εύκαμπτα ενδοσκόπια και κρίσιμα υλικά όπως polycarbonate, polysulfone και ακρυλικό γυαλί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε λουτρά υπερήχων.
	Χαμηλός αφρισμός	Κατάλληλο για επεξεργασία ενδοσκοπίων σε ημιαυτόματες συσκευές.
	Πλήρως διαλυτοί κόκκοι	Κατάλληλο για κάθε εφαρμογή, ακόμη και σε κοίλα όργανα με πολύ μικρή εσωτερική διατομή
	Συμβατό με άλλα χημικά	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προκαταρκτική καθαριότητα / απολύμανση ενδοσκοπίων πριν από την τοποθέτησή τους σε αυτόματα πλυντήρια όπου χρησιμοποιούνται απολυμαντικά με βάση τις αλδεΐδες ή το υπεροξικό οξύ.
	Δείκτες για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας	Βεβαιωμένη ασφάλεια για τον χρήστη με τον έλεγχο ενός ιδιαίτερα επιβαρυνμένου από οργανικό φορτίο διαλύματος ή σε περίπτωση αυξημένης θερμοκρασίας όπως π.χ. σε πλυντήρια υπερήχων.

*DGHM: Γερμανική Εταιρεία Υγιεινής και Μικροβιολογίας.

δράση σήμερα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για την αξιολόγηση της ιοκτόνου δράσης ενός απολυμαντικού, ο ιός ροίο έχει μεγάλη σημασία διότι κατατάσσεται ως ο πλέον ανθεκτικός ιός στα πρότυπα δοκιμών. Η πρωτοποριακή σύνθεση της άμεσα και εύκολα διαλυόμενης σκόνης Sekusept®

Aktiv παρέχει ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα βασισμένο στο ενεργό οξυγόνο και το υπεροξικό οξύ που είναι δραστικό κατά σπόρων βακτηριδίων. Αυτό εξασφαλίζει την υψηλή αποτελεσματικότητα σε ιδιαίτερα σύντομο χρόνο δράσης.

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ + ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ: ΥΨΗΛΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΑΣΦΑΛΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Το Sekusept® Aktiv πέρα από ιδιαίτερα αποτελεσματικό είναι και οικονομικό χάρη στη χαμηλή δοσολογία χρήσης.

Το διάλυμα του Sekusept® Aktiv συνδυάζει άριστη συμβατότητα με υλικά με εξαιρετικές επιδόσεις.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΥΛΙΚΑ:

Μετά την καθαριότητα και την απολύμανση, εξ ίσου σημαντική παράμετρος είναι και η συμβατότητα του διαλύματος εφαρμογής με τα υλικά των εργαλείων.

Πολλά εργαλεία έχουν πολύπλοκο σχεδιασμό και αποτελούνται από διαφορετικά υλικά που θέτουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσο αφορά τη συμβατότητα κατά τη διαδικασία επεξεργασίας τους.

Το Sekusept® Aktiv αποτελεί μια μοναδική λύση που καλύπτει τις διαφορετικές απαιτήσεις ενός απολυμαντικού εργαλείων.

Δεν είναι κατάλληλο για εργαλεία από χαλκό και ορείχαλκο καθώς και για επιχρωμιωμένα και επινικελωμένα εργαλεία που έχουν υποστεί βλάβες από μηχανική καταπόνηση.

PerOxyBalance®

Αυτό το είδος υπεροξικού οξέος είναι μια μοναδική εναλλακτική λύση στη θέση των απολυμαντικών με αλδεύδες. Το PerOxyBalance παρέχει υψηλής αποτελεσματικότητας απολύμανση για ένα ευρύ φάσμα μικρο-οργανισμών συμπεριλαμβανομένων και σπόρων βακτηριδίων.

Το PerOxyBalance διαθέτει εξαιρετική συμβατότητα με τα υλικά, ειδικά για ευαίσθητα υλικά όπως τα εύκαμπτα ενδοσκόπια. Η Ecolab με το PerOxyBalance κατόρθωσε να φέρει το pH του διαλύματος υπεροξικού οξέος σε ουδέτερο προς ήπια αλκαλικό επίπεδο.

Τα απολυμαντικά της σειράς PerOxyBalance παρέχουν την ιδανική ισορροπία μεταξύ συμβατότητας με τα υλικά, υψηλής αποτελεσματικότητας αντιμικροβιακή δράση σε σύντομους χρόνους έκθεσης και υψηλής ασφάλειας εφαρμογής.



Το σύστημα δοχείων Sekusept® για την επεξεργασία των εργαλείων.

Αποτελέσματα μικροβιολογικών και ιολογικών δοκιμών	Συγκ %	Συγκ g/l *	Χρόνος δράσης
Απολύμανση εργαλείων σύμφωνα με το VAH (DGHM), καθαρές και βρόμικες συνθήκες, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, EN 13727, EN 13624 (μύκητες), EN 14561, EN 14562	1,0 2,0	10 20	60 λεπτά 5 λεπτά
Απολύμανση εργαλείων σύμφωνα με το VAH συμπ. Tb, καθαρές και βρόμικες συνθήκες, μυκοβακτηριοκτόνο EN 14348, EN 14563	1,0 2,0	10 20	60 λεπτά 5 λεπτά
Καταχωρημένο από το RKI - Αντιμικροβιακό φάσμα τύπου A,	2,0	20	60 λεπτά
Bacillus subtilis σποροκτόνο σύμφωνα με το EN 13704	2,0	20	15 λεπτά
Clostridium difficile	2,0	20	5 λεπτά
Ιοκτόνο σύμφωνα με το EN 14476	1,0 2,0	10 20	60 λεπτά 10 λεπτά

* 20g = 30ml σκόνης Sekusept® Aktiv, 1 δοσομετρικό κουταλάκι = 20g, 1 δοσομετρικό κυπέλλο = 100g

Πεδία εφαρμογής

Το Sekusept® Aktiv είναι κατάλληλο για το χειρωνακτικό καθαρισμό και απολύμανση θερμοσταθερών και θερμοευαίσθητων ιατρικών εργαλείων συμπ. εύκαμπτων ενδοσκοπίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία ενδοσκοπίων για επεξεργασία σε ημιαυτόματες συσκευές απολύμανσης και για το χειρωνακτικό προκαταρκτικό καθαρισμό ενδοσκοπίων πριν από επεξεργασία σε αυτόματες μηχανές απολύμανσης. Δεν υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας μεταξύ του Sekusept® Aktiv και των χημικών που χρησιμοποιούνται στις μηχανές αυτές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε λουτρά υπερήχων.

Πιστοποίηση

Εκτενείς μικροβιολογικοί έλεγχοι και αυστηρή τοξικολογική και οικολογική αξιολόγηση εγγυώνται απόλυτη ασφάλεια για το χρήστη. Τα σχετικά πιστοποιητικά βρίσκονται στη διάθεσή σας.

Χρησιμοποιείτε τα απολυμαντικά με ασφάλεια. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο έντυπο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Τηρείτε πάντοτε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των εργαλείων. Για επαγγελματική χρήση μόνο. Είναι πιθανός ελαφρύς αποχρωματισμός της σκόνης. Αυτό δεν επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Οδηγίες εφαρμογής

Προετοιμασία του διαλύματος

Για την προετοιμασία του διαλύματος εφαρμογής χρησιμοποιήστε το δοσομετρικό κουτάλι ή κύπελλο που θα βρείτε στη συσκευασία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκόνης στο νερό ανακατεύοντάς το περιοδικά για περίπου 15 λεπτά. Μετά από 15 λεπτά το απολυμαντικό διάλυμα είναι έτοιμο προς χρήση.

Χειρωνακτική επεξεργασία εργαλείων

Τοποθετήστε τα εργαλεία και τις συσκευές στο διάλυμα αμέσως μετά τη χρήση τους. Βεβαιωθείτε πως τα εργαλεία διαβρέχονται πλήρως και πως δεν έχει παγιδευτεί αέρας ή φυσαλίδες στις κοιλότητες και τους αυλούς. Ακολουθείτε πάντοτε την προτεινόμενη συγκέντρωση και χρόνο έκθεσης. Μετά την απολύμανση, ξεβγάλετε τα εργαλεία με νερό ποιότητας τουλάχιστον πόσιμου, ή καλύτερα με στείρο, απεσταγμένο ή πλήρως αφαλατωμένο νερό.

Προετοιμασία σε λουτρό υπερήχων

Το Sekusept® Aktiv μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε λουτρό υπερήχων από ανοξείδωτο ατσάλι. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε τον χρόνο έκθεσης στα ηχητικά κύματα που ορίζεται από τον κατασκευαστή του εργαλείου. Για αποτελεσματική απολύμανση σύμφωνα με το VAH, θα πρέπει να τηρείται χρόνος έκθεσης τουλάχιστον 5 λεπτών.



Συσκευασίες

4 x 1,5 kg
1 x 6 kg

Ταινίες ελέγχου

50 ταινίες ανά σωληνάριο
Χαρτοκιβώτιο με
4 σωληνάρια

MED + DITERRANEAN
medical & pharmaceutical supplies

Προσηλίου 3, Παιανία Αττικής Τ.Κ. 19002,
Ελλάδα.
Τηλ. Επικ. : +30 211 212 8485
Τηλ. Άμεσης Εξυπηρ. Πελατών : +30 6956
094 025
WWW.MEDDITERRANEAN.COM
info@medditerranean.com
medditerranean.international@gmail.com